



non sterile



CE 0123

Revision: 150415

Diese Anweisung ist vor der Benutzung unserer Instrumente auf jeden Fall zu beachten, denn nur so können wir auf Dauer ein einwandfreies Funktionieren unserer Instrumente gewährleisten.

Unsere Instrumente sind äußerst fein beziehungsweise feingliedrig gestaltet. Sie sind deshalb besonders empfindlich gegen unsachgemäße mechanische Beanspruchung bei Anwendung, Transport und Aufbereitung.

Diese Instrumente werden mit großem handwerklichen Aufwand einzeln produziert und stellen deshalb einen hohen Wert dar. In der Praxis hat sich gezeigt, daß der überwiegende Teil der festgestellten Schäden auf mechanische Einflüsse zurückzuführen ist. Diese Schäden sind zumeist nicht zu reparieren.

Die **erbrich-instrumente** GmbH als Produzent und Verkäufer der Produkte übernimmt keine Haftung für unmittelbare Schäden oder Folgeschäden, die durch unsachgemäße Verwendung, Handhabung oder durch unsachgemäße Aufbereitung, Sterilisation und Wartung entstehen

Instrumente dürfen ausschließlich zu ihrer bestimmungsgemäßen Verwendung in den medizinischen Fachgebieten durch entsprechend ausgebildetes und qualifiziertes Personal benutzt werden.

erbrich-HF-Elektroden sind universell mit allen HF-Chirurgiegeräten, Kabeln, Handgriffen oder Adaptern mit Ø 4,0 / 2,4 / 1,6 mm Kontak verwendbar.

HF-Spitzenspannung Schneiden: max. 3000 Vs
HF-Spitzenspannung Spray: max. 4000 Vs

Auf festen Sitz der Elektroden im Handgriff, Kabel bzw. Adapter ist zu achten.

Schützen Sie die Elektroden vor mechanischer Beschädigung. Überprüfen Sie die Isolation und den Anwendungsteil der Elektrode vor jedem Gebrauch.

Beschädigte Elektroden dürfen nicht verwendet werden.

Nur im Autoklaven bis + 134° C sterilisieren.

Auf **keinen Fall** mit Heissluft sterilisieren.

Beachten Sie die Angaben des Desinfektionsmittel-Herstellers.

Des weiteren gelten die Angaben des HF-Geräte-Herstellers.

Achtung: Diese Elektroden sind nicht steril!!

erbrich-instrumente GmbH
Eugenstr. 33 - D 78352 Tuttlingen
Tel.: + 49 (0) 7461 965730
Fax.: + 49 (0) 7461 9657320

E-mail: info@erbrich-instrumente.de - Website: www.erbrich-instruments.com

